

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”水硬化暫封膏	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	------------	------	------------

“而至”水硬化暫封膏

許可證字號：衛署醫器輸字第 014467 號

製造日期： 批號：

有效期限：如外包装所示

台灣而至股份有限公司

台北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓

“而至”水硬化暫封膏

“GC” Caviton Hydraulic Temporary Restorative Filling Material

衛署醫器輸字第 014467 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品用途

本產品為用於牙科暫時性充填之材料。

禁忌症

罕見情況下，本產品可能可能造成某些人敏感。一旦發生這種反應，請停止使用並儘速就醫。

用法說明

1. 用小棉球將窩洞水分吸乾。
2. 用適當之器械將材料充填在窩洞，並進行面成形。當進行一號窩洞咬合面處理時，先讓患者咬合後，再進行面成形。
3. 請患者閉上嘴巴，充填物在 30 分鐘會因口腔內之水氣而硬化。請告知患者充填後 1 小時，勿強力咬合。

注意

1. 請勿與其他材料混合使用。
2. 在括除本產品時，附著在窩洞之碎片，請用酒精棉球擦拭。
3. 使用完畢請馬上蓋上蓋子。

儲存

儲存於 4-25°C (39.2-77.0°F)

(保存期限：工廠製造日起 2 年)

【包裝】

每罐=30 g

【型號】

003527 白色

003526 紅色

製造廠名：GC Asahi Corporation

地址：1-3-3 Kachigawa-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0945 Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓



標籤

注意事項等敘述，最後段須加刊

併列明

將照相影本代替黏貼報核