

“而至”艾哲透明印模材
“GC” EXACLEAR

衛部醫器輸字第 034022 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

建議用途

檢查咬合紀錄。

禁忌症

已知對矽膠(Silicone)過敏之患者不得使用。

預防措施

擠出或混合本產品材料時，應注意避免與以下物質混合或接觸，這些物質可能會延遲或防止凝固：縮合矽膠印模材料的催化劑(catalyst for condensation silicone impression materials)、多硫化物印模材料(polysulfide impression material)、丁香酚材料(eugenol material)、硫(Sulfur)、乳膠(latex)、油(oil)、丙烯酸酯(acrylates)、甘油(glycerol)以及噴霧型或軟膏型的局部表面麻醉劑(例如：利多卡因(lidocaine))。

顏色

透明。

儲存

建議儲存在室溫並避免陽光直射(15-25℃)，以保持最佳性能。(架儲期：製造後兩年內。)

製造廠名稱：GC Corporation Fuji Oyama Factory

製造廠地址：584-1, Nakahinata, Oyama-cho, Sunto-gun, Shizuoka-Ken, 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

型號規格

1	008482	EXACLEAR: - Cartridge 51g(48mL) *2 - Mixing Tip II L *6
---	--------	---

警告

1. 若接觸口腔組織或皮膚，請移除並用水沖洗。
2. 若接觸眼睛，立即用水沖洗並就醫。
3. 請勿混合使用本產品材料與其他產品成分。
4. 避免本產品材料接觸衣物，因為難以清除。
5. 在連接新的混合頭之前，先擠出少量材料，以確保基質和催化劑均勻流出。擠壓不均勻可能導致凝固延遲。
6. 請注意以避免攝入本產品材料。
7. 混合頭僅供一次性使用。為防止患者間之交叉污染，請勿重複使用混合頭。混合頭不能在高壓滅菌器或化學滅菌器中滅菌。
8. 全程穿戴個人防護裝備，例如手套、口罩和護目鏡。
9. 極少數情況下，本產品可能對某些人造成敏感性。若遇到任何此類反應，請停止使用產品並諮詢醫生。