

“而至”進階假牙密合劑

“GC” FIT CHECKER ADVANCED

衛部醫器輸字第 026180 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用
本產品限由牙醫使用於建議之產品用途

型號

004903 Fit Checker Advanced Tube1-1

004904 Fit Checker Advanced Cartridges 2pcs

004905 Fit Checker Advanced Blue Cartridges 2pcs

產品用途

Fit Checker Advanced

1. 用來檢查假牙修復體的密合精準度
 - 牙套: 牙套邊緣、近端與咬合面的表面
 - 預鑄根管柱釘: 根管柱釘的密合度
 - 嵌體: 嵌體邊緣、近端表面
 - 假牙: 黏膜表面
2. 檢查牙齒接觸面

禁忌症

罕見情況下有患者對本產品產生過敏反應。遇有此情況時請即停止使用本產品並就醫。

注意事項

將本產品擠出或是攪拌時應小心避免觸及下列材料以免延誤或是完全無法定型: 縮合式矽膠印膜材料、多硫化物印膜材料的催化劑、丁香油料、硫化物、乳膠、油類、丙烯酸酯類、甘油與噴霧型或是藥膏狀的表面麻醉劑

密合度之檢查

1. 將攪拌好的膏狀擠壓到修復體的內部表面。在23°C溫度下操作時間從攪拌開始算約一分鐘即可。按住擠壓在表面的材料一分鐘直到定型為止。
2. 用適當的器材將假牙取出後根據本密合膏顯示的厚度即可評估假牙的密合度。當覆蓋於假牙表面的密合膏厚度均勻一致時即代表理想的密合性。如有某一點特別厚或是薄時，則須用基本的標準技術進行修正。
3. 評估完畢後將假牙上密合膏清除，並清潔假牙表面。
注意:
 - a. 本產品不得使用於表面有軟性矽膠襯底材料的假牙上，否則將很難清除。
 - b. 本產品屬高流動性質材料。應注意勿讓材料流入患者喉嚨內。
 - c. 使用本產品時應避免牙齒與其週邊組織處於乾燥狀態。
 - d. 本產品的獨特化學性可在室溫下加速在口腔內的聚合，即可能因為口腔內的既有材料引發不當的後果。是以，在決定定型的時間時須先查在口腔內的現有材料。
 - e. 溫度高會縮短操作時間，溫度低則延長操作時間。

牙齒接觸面之檢查

1. 將密合膏抹在牙齒接觸面後請患者慢慢咬合。維持咬合狀態約一分鐘等材料定型。
2. 定型後將假牙移除並評估牙齒的接觸面。
3. 印模型在水龍頭下沖洗乾淨後進行消毒程序。

注意:

- a. 用矯正器材進行牙模咬合定位時，先用臘將凹處堵住。
- b. 在模型上進行牙模咬合定位時，在使用本產品前先在模型或是假牙上薄薄的塗抹一層凡士林。

顏色

白色、藍色

儲存方式

室溫儲存(15 - 25°C, 59 - 77°F)，並避免陽光直射。(上架壽命:製造日期後推兩年)。

包裝

Fit Checker Advanced:

1. 管狀
1-1 管狀包裝: 基底材55g (42mL), 催化劑50g (42mL), 延遲劑3g與攪拌墊。
2. 筒狀
雙筒狀: 筒裝62g (48mL) x 2, 攪拌嘴 (MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3)

Fit Checker Advanced Blue:

雙筒狀: 筒裝56g (48mL) x 2, MIXING TIP II S x 3, 攪拌嘴 (MIXING TIP II SS x 3)

警告

1. 如有碰觸到口內組織或是皮膚時, 請立即去除並用水清洗。
2. 如有碰觸到眼睛時, 請立即用水沖洗並就醫。
3. 本產品不得與其他產品成分合併使用。
4. 應避免沾到衣服, 否則很難去除。
5. 如有碰觸到皮膚時, 請在定型後將之移除。如在尚未定型前移除, 材料可能黏在皮膚上
6. 應避免誤食本產品。

製造廠名稱: GC Dental Products Corporation

製造廠地址: 2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

藥商名稱: 台灣而至股份有限公司

藥商地址: 臺北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓