

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”富士二型復形黏著材	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	---------------	------	------------

“而至”富士二型復形黏著材


許可證：衛署醫器輸字第 012650 號

製造日期：批號：

有效期限：如外包装所示

台灣而至股份有限公司

台北市民生東路三段 156 號 14 樓

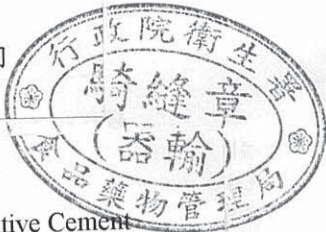

99.10.27

“而至”富士二型復形黏著材
“GC” Fuji II Radiopaque Glass Ionomer Restorative Cement

衛署醫器輸字第 012650 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警語及注意事項請參照原廠資料

型號：Fuji II, Fuji II Capsule

產品敘

本產品為改良的第二代玻璃離子復形用水泥。其特性有高抗水性，擋光性，容易攪拌，固定精準，表面硬度更佳，與更好的黏著度與受力。
僅能由牙科醫師依建議的用途使用。

建議之用途

1. 乳齒的復形充填。
2. 構築冠心。
3. 第三級、第五級及局限性第一級窩洞的復形充填。

儲存

保存溫度為 4-25°C (39.2-77.0°F)。

(保證保存期限：FUJI II Cement 3 年, FUJI II Capsule 2 年)

色調

色號	顏色	FUJI II Cement	FUJI II Capsule
21	淡黃色	✓	✓
22	黃褐色	✓	✓
22.5	灰褐色	✓	✓
23	暗灰色	✓	✓
23M	深灰色	✓	✓
26	深褐色	✓	✓
M	修飾劑	✓	

包裝

FUJI II CEMENT ISO 9917: 1991 (E) (水溶性牙齒黏固粉 [Dental water based cements])

1	003111	15 公克粉末瓶裝，內附量匙。
	003112	#21
	003113	#22
	003114	#23
	000099	#26
2	003115	#M
		10 公克液體瓶裝。
3	003107	1-1 組合包：15 公克粉末、10 公克液體、量匙、混合墊 (22 號)。
	003108	#21
	003109	#22
	003110	#23
		#26

FUJI II CAPSULE

1	000113	50 粒膠囊
	000114	#ASS CE
	000115	#21 CE
	000116	#22 CE
	000117	#22.5 CE
	000118	#23 CE
	000119	#23M CE
		#26 CE

製造廠名稱：GC CORPORATION Fuji Oyama Factory
製造廠地址：584-1, Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun, Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司
藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

※ 裝
※ 中
※ 製
※ 仿

項等敘述，最後段須加刊

影本代替黏貼報核

