

“而至”富士暫時性黏著劑
“GC” Fuji Temp LT

衛署醫器輸字第022863號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。
本產品限由牙科專業醫師使用於建議之用途。

型號: 004253

產品用途

1. 全陶瓷，樹脂與金屬為底的牙冠、牙橋的暫時性黏著。
2. 各種全陶瓷，樹脂與金屬為底之牙橋冠上的植體基柱的暫時性黏著。

禁忌症

罕見情況下有患者對本產品產生過敏反應。發現此情況時，請即停止使用並就醫。

使用須知

膏劑間的比率 (g/g)	0.7 / 1.0
攪拌時間 (秒)	10"-15"
操作時間 (分, 秒) (溫度 23°C下開始攪拌)	2'00"
去除殘留材料後，最終完呈拋光的時間(分, 秒)	3'00"

色樣

通用型

儲存

儲存於4~25°C間的室溫下，避免濕度、日照的熱度。

有效期間: 製造日期後兩年內。

包裝內容

- 1) GC Fuji TEMP LT 材料管補充包13.3g / 7.2mL (2)，攪拌墊 (1)
- 2) 擠膏器 (1)

注意

1. 碰觸到口腔組織或是皮膚時，請即用海綿或是酒精棉擦拭，用水沖洗乾淨。為避免皮膚與口腔組織的接觸，可用橡皮障或是用塗抹椰子油的方式將治療區域隔離出來。請戴塑膠或是橡皮手套。
2. 碰觸到眼睛時，立即用水沖洗後就醫。
3. 避免材料沾黏到衣物。

製造廠名稱: GC Corporation, Fuji Oyama Factory

製造廠地址: 584-1 Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun, Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱: 台灣而至股份有限公司

藥商地址: 臺北市松山區民生東路三段156號14樓