

“而至”吉冠自黏式保護膜劑
“GC” G-Coat Plus

衛署醫器輸字第024076 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號: 002583 G-Coat Plus 4 mL

產品敘述

本產品為光聚式，由單體與填料組成，可形成透明薄膜，既可保護齒緣，又可避免牙齒染色。

產品建議用途

1. 密封並保護牙齒表面的玻璃離子、直接/間接複合牙材與傳統的修復體。
2. 密封並保護修復體與牙結構間的黏著界面。

禁忌症

罕見情況下有患者對本產品產生過敏反應。發現此情況時，請立即停止使用並就醫。

以下情況禁用

與含有去敏劑與丁香酸成分的材料合併使用，會影響本產品的固化或黏著特性。

注意:

如牙齒表面在光照前已被水分、血液或是唾液污染時，請先清洗並烘乾牙齒表面後，重複上膜的程序。

光照聚合

上膜後立即使用可見光照機 (> 500mW/cm²: 鹵素燈, GC G-光照機, LED) 照射20 秒。

注意:

- 1) 讓光源盡量靠近覆膜的表面。
- 2) 如表面未乾透或是泛黃時，須重複光照程序。
- 3) 光照過程中須戴上護目罩。

儲存

一段時間未使用的情況下，請儲存於冷藏櫃內。否則，儲存於室溫下攝氏4-25度間即可。

有效期間: 製造日期後兩年內。

包裝內容

補充包4mL (1)、單次用攪拌碗(20)，微型塗抹嘴 (50)，塗抹嘴固定把手(1)

注意事項

1. 本產品屬易燃物質。勿在燃火處附近使用本產品，勿靠近火源，勿大量集中儲存，並避免日照。
2. 本產品揮發性高。須在通風處使用，使用完畢立即蓋好。
3. 碰觸到眼睛時，立即用水沖洗後就醫。
4. 碰觸到口腔組織或是皮膚時，請立即用海綿或是棉花球擦拭。修復療程結束後，用水沖洗乾淨。
5. 當碰觸到本材料的組織有泛白或是水泡現象時，請立即告知患者並不得再碰觸該部位，直到1-2週內現象解除為止。為避免直接接觸，建議在無法覆蓋橡皮障之處塗抹上椰子油。
6. 避免吸入或是吞食本材料。
7. 避免材料沾黏到衣物。
8. 勿與其它產品混合使用。

製造廠名稱: GC Corporation, Fuji Oyama Factory

製造廠地址: 584-1 Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun, Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱: 台灣而至股份有限公司

藥商地址: 臺北市松山區民生東路三段156號14樓