

99.10.27

“而至”光雅特複合牙材
“GC” GRADIA DIRECT Light-Cured Composite Restorative

衛署醫器輸字第 012873 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料

限牙科醫師應用於建議之用途

光雅特複合牙材是可見光聚合的微洞填補混成樹脂 (MFR)。有 光雅特複合牙材前牙區和光雅特複合牙材 後牙區 二種產品，光雅特複合牙材提供不同色調和暗度，具有牙齒般的蛋白光和螢光，可以造成和真實牙齒相似的外觀。光雅特複合牙材有預先分配好劑量的尖嘴形式和針筒形式。光雅特複合牙材 後牙區是不透射線的。

建議之用途

A. 光雅特複合牙材 前牙區

1. 直接修補第 III、IV、V 級蛀牙。
2. 直接修補楔形缺洞和牙根表面的蛀洞。
3. 直接修補前牙貼面和牙間縫。

B. 光雅特複合牙材 後牙區

1. 直接修補第 I、II 級蛀洞

色調

1. 前牙有 22 種色調

標準色調：BW (漂白的白)、A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、C3、CV (頸部)、CVD (頸部深色)

內側特殊色調：AO2、AO3、AO4

外側特殊色調：WT (白色半透明)、DT (深色半透明)、CT (清朗半透明)、NT (自然半透明) GT (灰色半透明)、CVT (頸部半透明)

2. 後牙有 6 種色調

標準色調：P-A1、P-A2、P-A3、P-A3.5

外側特殊色調：P-WT (白色半透明)、P-NT (自然半透明)

儲存

儲存於冷暗之處 (4-25°C) (39.2-77.0°F)，避開高溫或日光直射。

(保存期限：從製造日期起 2 年)

包裝

I. 尖嘴

1. 介紹組

(35 個尖嘴，7 種色調)

- 35 個尖嘴 (7 種色調，每種 5 個) (每個尖嘴有 0.16ml)

(6 種前牙色調：A2、A3、A3.5、AO3、CV、CT)

(1 種後牙色調：P-A2)

- 色調指引

2. 補充包

a. 20 個尖嘴包裝 (14 種色調) (每個尖嘴有 0.16ml)

(8 種前牙色調：A1、A2、A3、A3.5、AO3、CV、NT、DT)

(6 種後牙色調：P-A1、P-A2、P-A3、P-A3.5、P-WT、P-NT)

b. 10 個尖嘴包裝 (12 種色調) (每個尖嘴有 0.16ml)

(12 種前牙色調：-BW、A4、B2、B3、C3、AO2、AO4、CVD、CT、WT、GT、CVT)

注意：每個尖嘴的重量：前牙尖嘴是 0.24g，後牙尖嘴是 0.28g

3. 選購

a. 尖嘴分配器 b. 色調指引 c. 混合墊 (No. 14B)

II. 針筒

1. 介紹組

- 7 個針筒 (每個 7 種色調) (每個針筒有 2.7ml)

(6 種前牙色調：A2、A3、A3.5、AO3、CV、CT)

(1 種後牙色調：P-A2)

- 色調指引

2. 重複裝填

- 1 個針筒 (26 種色調) (每個針筒有 2.7ml)

注意：每個針筒的重量：前牙針筒是 4g，後牙針筒是 4.7g

3. 選購

a. 色調指引 b. 混合墊 (No. 14B)

訂購型號：

001966	Introductory Kit Unitip
003143	Unitip A1 20 pcs.
003144	Unitip A2 20 pcs.
003145	Unitip A3 20 pcs.
003146	Unitip A3.5 20 pcs.
003147	Unitip AO3 20 pcs.
003148	Unitip CV 20 pcs.
001973	Unitip E1 20 pcs.
001974	Unitip E3 20 pcs.
003150	Unitip NT 20 pcs.
003149	Unitip DT 20 pcs.
003152	Unitip A4 10 pcs.
003153	Unitip B2 10 pcs.
003154	Unitip B3 10 pcs.
003155	Unitip C3 10 pcs.
003157	Unitip AO2 10 pcs.
003158	Unitip AO4 10 pcs.
003156	Unitip CVD 10 pcs.
003151	Unitip BW 10 pcs.
003160	Unitip CT 10 pcs.
003159	Unitip WT 10 pcs.
003161	Unitip GT 10 pcs.
003162	Unitip CVT 10 pcs.
003164	Unitip B1 10 pcs.
003163	Unitip XBW 10 pcs.

003172	Syringe A1
003173	Syringe A2
003174	Syringe A3
003175	Syringe A3.5
003183	Syringe AO3
003180	Syringe CV
001994	Syringe E1
001995	Syringe E3
003188	Syringe NT
003176	Syringe A4
003177	Syringe B2
003178	Syringe B3
003179	Syringe C3
003182	Syringe AO2
003184	Syringe AO4
003181	Syringe CVD
003187	Syringe CT
003171	Syringe BW
003185	Syringe WT
003189	Syringe GT
003186	Syringe DT
003190	Syringe CVT
003192	Syringe B1
003191	Syringe XBW
003165	Unitip P-A1 20 pcs.
003166	Unitip P-A2 20 pcs.
003167	Unitip P-A3 20 pcs.
003168	Unitip P-A3.5 20 pcs.
002001	Unitip P-E1 20 pcs.
003170	Unitip P-NT 20 pcs.
003169	Unitip P-WT 20 pcs.
003193	Syringe P-A1
003194	Syringe P-A2
003195	Syringe P-A3
003196	Syringe P-A3.5
002007	Syringe P-E1
003198	Syringe P-NT
003197	Syringe P-WT
002009	SHADE GUIDE

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation
製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司
藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓