

# 醫療器材仿單標籤粘貼表

|        |             |      |            |
|--------|-------------|------|------------|
| 產品中文名稱 | “而至”聚羧酸鹽黏合劑 | 申請廠商 | 台灣而至股份有限公司 |
|--------|-------------|------|------------|

## “而至”聚羧酸鹽黏合劑

“GC”Livcarbo

許可證：衛署醫器輸字第 012570 號

製造日期：批號：

有效期限：三年

台灣而至股份有限公司

台北市民生東路三段 156 號 14 樓



94.11.09

“而至”聚羧酸鹽黏合劑

“GC”Livcarbo Polycarboxylate Cement

衛署醫器輸字第 012570 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用  
本案產品使用方法、禁忌症、警語及注意事項請參照原廠資料

### 產品敘述

本產品有粉劑與液劑，是會釋放出氟化物的聚羧酸鹽黏合劑，具有容易處理、能夠形成極薄的薄層、對於牙齒結構的附著力極佳、生物相容性很好，和持久等特性。

限牙科醫師應用於建議之用途

### 建議之用途

1. 黏合嵌體、牙冠、牙橋和齒列矯正環。
2. 複合樹脂和銀粉充填下的基底或襯底。
3. 建立牙齒核心。

### 用法說明

### 物理性質

聚羧酸鹽黏合劑

ADA 規格

| 粉末/液體比例<br>(g/g) | 1.6/1.0    | 2.0/1.0<br>(標準) | 2.4/1.0    | 3.0/1.0    | —         |
|------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 操作時間(分, 秒)       | 2分30秒      | 2分15秒           | 2分鐘        | 1分30秒      | —         |
| 安裝時間(分, 秒)       | 7分30秒      | 6分15秒           | 5分45秒      | 5分鐘        | 最多9分鐘     |
| 黏稠度(mm)          | 43         | 37              | 32         | 26         | —         |
| 薄層厚度(μm)         | 12         | 13              | 16         | 18         | 最多25      |
| 附著強度<br>(MPa)    | 牛珞瑯質       | 3.0 (0.5)       | 3.4 (0.5)  | 3.6 (0.5)  | 3.7 (0.6) |
|                  | 牛牙本質       | 2.5 (0.4)       | 2.9 (0.5)  | 2.8 (0.4)  | 3.1 (0.6) |
| 崩解(%)            | 0.06       | 0.04            | 0.04       | 0.03       | 最多0.2     |
| 抗壓強度(MPa)        | 74.5 (3.9) | 79.4 (2.0)      | 82.4 (2.9) | 85.3 (2.0) | 50分鐘      |
| 用途               | 黏著         | 黏著              | 黏著         | 基底         | 基底, 黏著    |

### 色調

淺黃色

※

※

※

※

※

| #  | 型號     | 內容                    |
|----|--------|-----------------------|
| 1. | 000020 | 1-1 包裝：粉劑 125g、液劑 70g |
| 2. | 000019 | 粉劑 125g               |
| 3. | 000127 | 液劑 70g                |

須加刊

製造廠名稱：GC CORPORATION Fuji Oyama Factory

製造廠地址：584-1, Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun, Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓