

“而至”奧迪彩色覆蓋材料

“GC” Optiglaze Color

衛部醫器輸字第028048號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用

效能

- ◆ 直接與間接複合修復體，樹脂牙床與樹脂牙因不同自然牙所做的個別化處理。
- ◆ 加強複合樹脂修復體，樹脂假牙基底與樹脂牙表面的平滑與耐磨性。

注意：

不適用於自然齒。

禁忌症

極少情況下本產品可能引發敏感反應。發現此狀況時請即停止使用本產品並就醫。

儲存方式

建議存複於室溫(4-25°C)以維持產品的最佳功能狀態。
保存期限為自製造日期起 3 年

警告

- ◆ 使用時請戴上手套與護目鏡。
- ◆ 尤其需避免未聚合之材料與皮膚碰觸。
- ◆ 避免衣物沾染到材料。
- ◆ 本產品為易燃性高且易蒸發的液體。操作時需遠離明火。請與火源保持安全距離。
- ◆ 本產品極易揮發進而刺激呼吸道。請在通風良好處使用本產品。使用完必立即關緊瓶蓋。
- ◆ 不建議在高壓環境下使用本產品。
- ◆ 如有誤觸到眼睛，請即用清水沖洗後就醫。
- ◆ 如有誤觸到皮膚，請即用海綿或棉球擦拭後用水沖洗乾淨。
- ◆ 使用本產品前，將欲染色區塊受氧化抑制的表層先清除後再行染色，否則可能會影響染色劑的固化。
- ◆ 因為本產品揮發性高，請於預備要染色時才點數滴染色劑於單次性的小碟內使用。
- ◆ 儲存於有鎖可隔離的地方。
- ◆ 使用完畢，請依據規定處理善後。

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation

製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi
486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市松山區民生東路3段15號14樓

規格與型號

1	008408	Optiglaze color complete set: ◆ 2.6ml each A plus, B plus, C plus, white, ivory white, yellow, orange, pink orange, red brown, olive, grey, blue, lavender, pink and red, ◆ 5mL each clear and clear HV ◆ Accessories: Disposable palette x5 Protective cover x1 Brush round 5pcs (No.1B) x1 Brush rush flat 5pcs (No.1B) x1 Brush holder x 2 (1 each ivory, white)
2	008409	Optiglaze color A plus 2.6ml
3	008410	Optiglaze color B plus 2.6ml
4	008411	Optiglaze color C plus 2.6ml
5	008412	Optiglaze color white 2.6ml
6	008413	Optiglaze color ivory white 2.6ml
7	008414	Optiglaze color yellow 2.6ml
8	008415	Optiglaze color orange 2.6ml
9	008416	Optiglaze color pink orange 2.6ml
10	008417	Optiglaze color red brown 2.6ml
11	008418	Optiglaze color olive 2.6ml
12	008419	Optiglaze color grey 2.6ml
13	008420	Optiglaze color blue 2.6ml
14	008421	Optiglaze color iavender 2.6ml
15	008422	Optiglaze color pink 2.6ml
16	008423	Optiglaze color red 2.6ml
17	008424	Optiglaze color clear 5ml
18	008425	Optiglaze color clear HV 5ml