

“而至” 天波馬雙固化暫時性牙冠及牙橋樹脂
“GC” TEMPSMART DC
dual-cured composite for temporary crown and bridge

衛部醫器輸字第 033989 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用
本產品限牙科專業人員依建議適應症使用

適應症

- 暫時性牙冠、牙橋、嵌體、冠蓋體、貼面之製作。
- 長期型暫時性復形物之製作。

禁忌症

已知對甲基丙烯酸酯單體、甲基丙烯酸酯聚合物過敏者，請勿使用本產品。

色度

A1、A2、A3、A3.5、B1、BW

型號規格

48毫升裝：Cartidge 48 mL*1、Mixing tip II SSS*16		
1	012760	TEMPSMART DC 48mL cartridge A1
2	012761	TEMPSMART DC 48mL cartridge A2
3	012762	TEMPSMART DC 48mL cartridge A3
4	012763	TEMPSMART DC 48mL cartridge A3.5
5	012764	TEMPSMART DC 48mL cartridge B1
6	012765	TEMPSMART DC 48mL cartridge BW
10毫升裝：Cartidge 10 mL*1、GC Automix Tip Regular*10		
7	012766	TEMPSMART DC 10mL cartridge A1
8	012767	TEMPSMART DC 10mL cartridge A2
9	012768	TEMPSMART DC 10mL cartridge A3
10	012769	TEMPSMART DC 10mL cartridge B1

警告

- 若接觸到口腔組織或皮膚，立即用酒精棉球或紗布清除，並用水沖洗，為避免接觸，可以使用橡皮帳和/或可可脂隔離皮膚或口腔的手術區域組織。
- 若接觸到眼睛時，立即用水沖洗並就醫。
- 避免攝入物質。
- 勿與其他產品混合使用。
- 混合頭僅供一次性使用。為防止患者之間交叉污染，請勿重複使用混合頭。混合頭不能在高壓滅菌器或化學滅菌器中滅菌。
- 務必佩戴個人防護設備(PPE)，如手套、口罩和護目鏡。使用過程中戴上手套，避免直接接觸空氣抑制的樹脂，以防止敏感。
- 在光固化期間請佩戴護目鏡。
- 拋光聚合材料時，請使用集塵器並戴防塵面罩，以免吸入灰塵。
- 避免產品內容物沾染衣物。
- 如果接觸到牙齒或義齒裝置非計畫中之區域，請先用器具、紗布或棉球去除，然後再進行光固化。
- 勿將本產品與含有丁香酚的材料結合使用，因為丁香酚會延遲或阻止本產品的固化。
- 勿使用過量酒精擦拭混合頭，可能導致產品內容物污染。
- 依據當地法規處理廢棄物。
- 極少數情況下，產品可能會在某些人中引起過敏。若遇到任何此類反應，請停止使用該產品並諮詢醫生。

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation

製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)