

“而至” 第三代優尼特自凝壓克力樹脂  
“GC” UNIFAST III  
self-curing acrylic resin

衛部醫器輸字第 033990 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用  
本產品限牙科專業人員依建議預期用途使用

預期用途

- 暫時性嵌體、牙冠和牙橋之建造。
- 假牙斷裂之修復。

禁忌症

已知對甲基丙烯酸酯單體、甲基丙烯酸酯聚合物過敏者，請勿使用本產品。

注意事項

- 凝固過程中會發生放熱反應。將未固化的材料放入口中時，請在溫度開始升高之前將其除去，以免牙髓燒傷或壞死。
- 請勿使用本產品修復義齒基托材料，或進行由 polycarbonate、polysulfone 或 polyethersulfone 樹脂製成的暫時牙冠的再襯墊。
- 復形物封入患者口腔之前，可將其浸泡水中至少 10 分鐘，以減少殘留單體的量。
- 混合材料的細小部分可能無法正確放置。將其置入/封入口腔中之前，請確保混合材料已完全固化。

色度

A1、A2、A3、A3.5、B2、E3、Incisal、Clear、No.3(Pink)、No.8(Pink Veined)。

警告

- 液體易燃，避免火源，勿近火或高溫環境中存放或使用。
- 避免粉末、液體或混合物直接接觸皮膚。一旦接觸，請用酒精棉球或海綿擦拭並用水沖洗。
- 避免粉末、液體或混合物直接接觸眼睛。一旦接觸，請立即用水沖洗並就醫。
- 液體易揮發，請在通風良好的地方使用。如果在固化之前將混合材料放在口中，提醒患者用鼻子呼吸。
- 勿將殘留在橡膠杯中的粉末或液體倒回瓶中。
- 勿將本產品與 UNIFAST Trad 或其他壓克力樹脂產品混合使用。
- 勿使用與其他壓克力樹脂一起使用的刷子或橡膠杯，因為這可能會延遲或阻礙本產品固化。
- 修整和拋光固化材料時，請戴好防塵面具。
- 液體可能隨時間變黃，但這不會影響其功能。
- 液體不應長時間留在橡膠杯中，因為它會改變操作屬性。
- 務必佩戴個人防護設備(PPE)，如手套、口罩和護目鏡。
- 在極少數情況下，該產品可能會在某些人中引起過敏。如果遇到任何此類反應，請停止使用該產品並諮詢醫生。

型號規格

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 002650 | <b>UNIFAST III 2-1PKG:</b><br>- UNIFAST III Powder 35g A3 *1<br>- UNIFAST III Powder 35g A2 *1<br>- UNIFAST III Liquid 40g(42mL) *1<br>- UNIFAST III Plastic Case 工具盒 *1<br>附件：<br>粉末量杯*1、液體量杯*1、拋棄式分配盤2號*5、橡膠杯*1、塑膠刮鏟*1、10號刷子*1 |
| 2  | 002657 | UNIFAST III Powder 35g A1                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | 002658 | UNIFAST III Powder 35g A2                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | 002659 | UNIFAST III Powder 35g A3                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | 002660 | UNIFAST III Powder 35g A3.5                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | 002661 | UNIFAST III Powder 35g B2                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | 002662 | UNIFAST III Powder 35g E3                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | 002663 | UNIFAST III Powder 35g Incisal                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | 002664 | UNIFAST III Powder 35g Clear                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | 002665 | UNIFAST III Powder 35g No.3(Pink)                                                                                                                                                                                                |
| 11 | 002666 | UNIFAST III Powder 35g No.8(Pink Veined)                                                                                                                                                                                         |
| 12 | 002667 | UNIFAST III Powder 100g A1                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | 002668 | UNIFAST III Powder 100g A2                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | 002669 | UNIFAST III Powder 100g A3                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | 002670 | UNIFAST III Powder 100g A3.5                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | 002671 | UNIFAST III Powder 100g B2                                                                                                                                                                                                       |
| 17 | 002672 | UNIFAST III Powder 100g E3                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | 002673 | UNIFAST III Powder 100g Incisal                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 002674 | UNIFAST III Powder 100g Clear                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | 002675 | UNIFAST III Powder 100g No.3(Pink)                                                                                                                                                                                               |
| 21 | 002676 | UNIFAST III Powder 100g No.8(Pink Veined)                                                                                                                                                                                        |
| 22 | 002678 | UNIFAST III Powder 300g A2                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | 002679 | UNIFAST III Powder 300g A3                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | 002683 | UNIFAST III powder 300g Incisal                                                                                                                                                                                                  |
| 25 | 002686 | UNIFAST III powder 300g No.8(Pink Veined)                                                                                                                                                                                        |
| 26 | 002651 | UNIFAST III Liquid 40g(42mL)                                                                                                                                                                                                     |
| 27 | 002652 | UNIFAST III Liquid 100g(104mL)                                                                                                                                                                                                   |
| 28 | 002653 | UNIFAST III Liquid 250g(260mL)                                                                                                                                                                                                   |

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation

製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)