

“而至”愛士迪牙周纖維加強複合材

“GC” everStickPERIO

衛部醫器輸字第027793號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用

本產品限由牙科專業人員使用於建議之用途。

產品敘述與用途

本產品結合玻璃纖維與只可滲透聚合物複合樹脂之凝膠，是牙科用的補強材料。凝膠將個別玻璃纖維黏著成束狀，使之方便運用。束狀纖維的彈性與黏性可快速黏結於牙齒。本產品的主要用途在於加強牙齒的固定，即牙周表面與內冠的固定：

- 舌顎間的固定
- 唇間固定
- 咬合面的固定

禁忌症

極少數情況下有患者對本產品過敏，遇此反應時應即停止使用本產品並就醫。

注意事項與建議

- 玻璃纖維需被樹脂凝膠完整覆蓋。
- 用橡皮障隔離治療區域以維持乾燥。
- 請以器械處理本產品以避免汙染，也可戴有粉末的手套處置
- 利用StickSTEPPER器械(本證不包含)進行纖維束的局部聚合。
- 將本固定材盡量貼近前齒區的咬合面緣。
- 萬一在置放好位置後發現纖維過長時，可在固定的最後階段，用磨牙鑽將纖維磨短。在纖維表面塗上琺瑯樹脂(即，StickRESIN(本證不包含))，將樹脂吹成薄膜後光照聚合。重覆在纖維上覆蓋樹脂的動作。
- 避免在固定的最後階段中修剪纖維。
- 在咬合接觸面上，固定纖維上所覆蓋樹脂的理想厚度為1-2 mm。

儲存

本產品需儲放於冰箱(溫度2-8°C/35-46°F)。產品使用後需用鋁箔後需密封以避免光源。溫度升高或是暴露於光源下皆會縮短本產品的壽命。

使用前先從冰箱取出產品，在遠離日光或人造光源的環境下打開鋁箔包。修剪纖維束時需留意留在鋁箔包內的纖維束有覆蓋並遠離光源。剪下所需的纖維長度後，立即將鋁箔包再次密封好放回冰箱。

有效期間：製造日期起兩年。

型號與規格

everStickPERIO

單向束狀 E 玻璃纖維

直徑: ~1.1-1.3mm

纖維數量：每束~2000 支

型號	規格
900822	2 x 12 cm
900832	1 x 8 cm

製造廠名稱/地址：Manufactured by Stick Tech Ltd (Lemminkaisenkatu 46, FI-20521 Turku, Finland) for GC Europe N.V. (Research Park, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium)

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市松山區民生東路3段156號14樓