

“而至” 愛羅馬香藻膠印模材

“GC” AROMA FINE PLUS ALGINATE IMPRESSION MATERIAL

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用。 衛署醫器輸字第022427號

僅供牙醫專業人員於適應症範圍內使用。

產品用途

本藻膠印模材適用於下列復形的牙齒初步印模：

- 暫時性嵌體、冠蓋體、牙冠、牙橋的印模
- 平行模型的製作
- 矯正模型的製作

禁忌症

避免將本產品用於已知對藻膠過敏的病患。

使用方法

	正常型 Normal set	慢凝型 Slow set
攪拌時間 (Mixing time)	20-30 秒	20-30 秒
總操作時間 (Working time)	90 秒	140 秒
初始凝固時間 (Initial setting time)	140 秒	205 秒
口內至少停留的時間 (Minimum time in mouth)	120 秒	180 秒

1. 使用前先將粉末散開。取適量的粉末與水分，標準比率為一匙粉(8.4g) 與半杯水(20mL)。
2. 攪拌約 20-30秒後，裝入印模牙托內。
3. 將裝好印模材的牙托放入口內。有關操作時間，請參考上表。
4. 等候印模材固化變硬。請參考上表有關在口內至少須停留的時間。
5. 將印模材取出後在水龍頭下沖洗乾淨。

注意：

1. 此時間是以在23°C溫度下使用蒸餾水或是去離子水的情況下計算出來。
2. 攪拌用水的溫度高或是粉末比例較高時會縮短初始凝固時間與總操作時間，並且影響流動率和其他物理性質。因此應以建議的比例與水溫調配。水硬度的差異會影響初始凝固時間與總操作時間的長短。

消毒

建議浸入0.5%的次氯酸鈉液內15分鐘進行消毒。建議參照各原廠提供的指示。

齒模的製作

1. 倒入石膏前請先去除多餘的水分。建議在沖洗完畢後立即倒入石膏以達到最精準的印模效果。
2. 如果因故無法立即倒入石膏，建議用濕巾包住牙模，或是將之放入密封的塑膠袋內。
請勿放入水中保存。

儲存

放置於密封罐內儲存於乾燥陰涼處 (4-25°C) (39-77°F)。

注意事項

1. 極少數情況下，有對本產品過敏的情形。如有發現此狀況請即停止使用本產品並就醫。
2. 如印模材或其混合物與眼睛接觸，立即用水沖洗並就醫。
3. 使用本產品時請戴上防塵面具以避免吸入粉末。
4. 本產品一經打開，請即放入印模材專用罐內。
5. 勿與其他產品混用。
6. 請務必穿戴個人防護裝備，如手套、口罩、護目鏡。

型號

#	型號	品名與規格
1	004110	Aroma Fine Plus Normal Set 500g*40 (500g bag*40)
2	004109	Aroma Fine Plus Slow Set 10kg (1kg bag*10)
3	10037423	Aroma Fine Plus Normal Set 500g
4	10037422	Aroma Fine Plus Slow Set 1kg

製造業者名稱：GC CORPORATION Fuji Oyama Factory

製造業者地址：584-1, Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun, Shizuoka-Ken
410-1307, Japan

醫療器材商名稱：台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址：(備註：本項不核定於標籤、說明書或包裝，市售品請逕依所轄衛生局最新核定之內容刊載醫療器材商地址)