

“而至” 單體光聚式黏著劑 “GC” G-Premio BOND

衛部醫器輸字第 033829 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用
本產品限牙科專業人員依建議用途使用

預期用途

- 光聚式複合材料與複合聚體於牙齒結構的直接粘合。
- 雙聚式冠心堆築材於牙齒結構的粘著。
- 複合材料、金屬基底和氧化鋯/鋁基底補綴物的口內修補。
- 含矽烷耦合劑之陶瓷修復體的口內修補。
- 過敏性牙齒的治療。
- 牙齒密封。

禁忌症

- 牙髓覆蓋。
- 已知對甲基丙烯酸酯單體、甲基丙烯酸酯聚合物或丙酮過敏的患者，請勿使用本產品。

本產品不得與下列材料合併使用

- 化學固化之複合樹脂。
- 含丁香油之材料，可能會抑制本產品的固化或粘著效果。
- 減敏劑，可能影響本產品的固化或粘著效果。

儲存

儲存在室溫下。

如果長時間不使用，請存放在冰箱中。

警告

- 在極少數情況下，該產品可能會在某些情況下引起敏感，如果發生這種反應，請停止使用產品並諮詢醫生。

- 應配戴個人防護設備例如手套、面罩和護目鏡。
- 避免吸入或攝入物質。
- G-Premio BOND是高度易燃的液體和蒸氣，請勿在明火附近使用，遠離火源。請勿在單一區域大量存放。避免陽光直射。
- G-Premio BOND易揮發，請在通風良好的地方使用。提醒使用時透過鼻子呼吸。
- G-Premio Bond單劑量僅供單次使用，請勿嘗試闔蓋或重複使用。單劑量打開後無法闔蓋，內裝溶劑可能會揮發。
- 如果接觸到眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。
- 如果接觸口腔組織或皮膚，請立即用紗布棉球擦拭，於補綴物修形完成後，用大量水沖洗。
- 如果與材料接觸的組織泛白或形成水泡，提醒患者勿碰觸患部，直到痕跡消失，通常在1-2週內。建議於橡皮障無法覆蓋部位塗抹可司油。
- 如果液體溢出表面，請立即用乾布擦拭。
- 請勿與其他產品混用。
- 按照當地法規處置內裝物/容器的廢棄物。

型號規格

1	012691	G-Premio BOND 5mL Kit: - G-Premio BOND 5mL Bottle Refill (1) - Disposable dispensing dish (20) - Disposable applicator II (50)
2	012696	G-Premio BOND 5mL Bottle Refill

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation

製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)