

"而至" 光固化矯正黏著劑

"GC" Ortho Connect Light-Cured Orthodontic Adhesive

衛部醫器輸字第 037030 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

僅限牙科專業人員使用於建議之適應症。

適應症

1. 黏接金屬矯正托架及附件。
2. 黏接陶瓷矯正托架。
3. 黏接塑膠矯正托架和壓克力矯正器。

禁忌症

1. 對甲基丙烯酸酯單體或甲基丙烯酸酯聚合物過敏者，應避免使用本產品。
2. 黏接不鏽鋼牙冠矯正維持器(例如 Herbst Appliances)。

成分

二甲基丙烯酸酯(Dimethacrylate), 二氧化矽(silicon dioxide), 鋇玻璃(barium glass), 磷酸酯單體(phosphoric acid ester monomer), 起始劑(initiator), 顏料(pigment), 穩定劑(stabilizer)。

操作指引之注意事項

1. 如要黏著的表面含有陶瓷、複合材料、氧化鋁或金屬，應進行相應處理。陶瓷及複合材料應進行噴砂及矽烷預處理。氧化鋁及金屬應進行噴砂。請參照製造業者的說明。
2. 注意勿將注嘴安裝過緊。這可能會損壞螺絲。為了確保連接緊密，請確認螺紋沒有殘留材料。
3. 在使用針筒材料之前，請確保注嘴已牢固地安裝到針筒上。輕輕向前推針筒推桿可以將注嘴中的空氣排出，並將頭的尖端朝上直到材料到達尖端的開口。
4. 操作：
 - a. 移除剩餘黏著劑後，應注意不要在黏著劑固化前移動矯正器。在此時移動矯正器可能降低黏著強度。
 - b. 盡量減少暴露在環境光下。環境光可能縮短操作時間。
5. 光固化建議以 LED 光照設備(>500 mW/cm², 460-480 nm)光照 10 秒鐘。
 - a. 固化燈的測試非常重要。定期使用測光錶以確保足夠的光輸出。
 - b. 盡可能地將光導靠近黏著劑及矯正器。

色度

透明。

儲存

為獲得最佳性能，建議儲存在室溫下(4-25°C / 39.2-77.0°F)，避免陽光直射。

包裝

- 2 x 2.9 g (2.0 mL) 針筒
- 4 x 用於本產品的注嘴
- 2 x 防光罩

警告

1. 如接觸到口腔組織或皮膚，請立即用棉花或浸泡在酒精的海綿清除。用水沖洗。為避免接觸，可使用橡皮障和/或可脂將操作區域與皮膚或口腔組織隔離。
2. 如接觸到眼睛，立即用水沖洗並就醫。
3. 注意避免攝食材料。

4. 如接觸到牙齒或修復裝置的非預期區域，請在光固化前用器械、海綿或棉球清除。
5. 勿將本產品與含有丁香酚的材料一起使用，因為丁香酚可能會妨礙本產品正確固化或黏合。
6. 勿與其他類似產品混合使用。
7. 注嘴不能在高壓滅菌器或化學滅菌器中進行消毒。
8. 勿用過量酒精擦拭注嘴，否則可能會污染材料。
9. 操作時戴上塑膠或橡膠手套，避免直接接觸空氣抑制的樹脂層，以防可能的過敏。
10. 光固化時請配戴防護眼鏡。
11. 拋光聚合材料時，使用集塵器並配戴好防塵面罩，避免吸入切割粉塵。
12. 避免將材料沾到衣服上。
13. 根據當地法規處理所有廢棄物。
14. 在極少數情況下，該產品可能會引起某些人的敏感。如出現任何此類反應，請停止使用該產品並諮詢醫生。
15. 應始終佩戴手套、面罩和安全眼鏡等個人防護裝備(PPE)。

型號與規格

型號	規格
013696	GC Ortho Connect FE - 2 x 2mL syringe; 4 x dispensing tip; 2 x light protective cover

製造業者名稱： GC Dental Products Corporation

製造業者地址： 2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

醫療器材商名稱： 台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址： 依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)