

“而至”富士九號加強型復形黏固粉
“GC” Fuji IX GP Extra

衛部醫器輸字第 032728 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

建議之適應症

1. 乳齒第一級與第二級窩洞的復形充填。
2. 恆齒非咬合承載區的第一級與第二級窩洞復形充填。
3. 使用三明治技術治療時，應力強大部位的第一級與第二級窩洞中期復形充填與基底材。
4. 第五級窩洞與牙根表面的復形充填。
5. 冠心構築。

禁忌症

1. 覆髓。
2. 已知患者對玻璃離子體士敏汀過敏時，應避免使用本產品。

儲存

建議存放於室溫，遠離熱源與直接日照(4-25°C)以維持產品的理想狀態。

色樣

A1、A2、A3、A3.5、B1、B2、B3、C4。

注意事項

1. 若接觸到口腔組織或皮膚時，應立即用浸有酒精的紗布或棉花拭淨，並用水沖洗。使用過程請戴手套。
2. 若接觸到眼睛，則應立即用水沖洗並且就醫。
3. 請勿將本產品粉末或液體與任何其他玻璃離子體成分混合。
4. 調理劑的調拌器勿與其他患者重覆使用。
5. 極罕見情況下如發現本產品引發患者過敏反應，應即停用本產品並就醫處置。
6. 操作本產品過程應做好個人防護，如穿戴手套、面罩與眼罩等。

原廠使用說明書內的產品依據GHS可能歸類為有危害性，請隨時上網取得最新的安全性資料(<http://www.qceurope.com>)或向當地經銷商索取。

Fuji IX GP-EXTRA型號與規格

型號	規格
005074	Fuji IX GP-EXTRA 1-1 A2 - Fuji IX GP-EXTRA Powder 15g A2 - Fuji IX GP-EXTRA Liquid 8g
005075	Fuji IX GP-EXTRA 1-1 A3 - Fuji IX GP-EXTRA Powder 15g A3 - Fuji IX GP-EXTRA Liquid 8g
005072	Fuji IX GP-EXTRA Liquid 8g
005079	Fuji IX GP-EXTRA Powder 15g A2
005080	Fuji IX GP-EXTRA Powder 15g A3
005081	Fuji IX GP-EXTRA Powder 15g A3.5

製造廠名稱: GC Corporation Fuji Oyama Factory

製造廠地址: 584-1, Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun, Shizuoka, Japan

藥商名稱: 台灣而至股份有限公司

藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)