

“而至”吉勝互適樹脂黏著劑 “GC” G-CEM LinkForce

衛部醫器輸字第 032844 號

注意：本產品限由牙醫使用於建議之產品用途
使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品用途

1. 各種陶瓷、樹脂與金屬為基底嵌體、嵌面與牙冠牙橋的黏著。
2. 金屬、陶瓷、纖維支柱、支柱、石膏支柱與冠心的黏著。
3. 所有陶瓷與複合式貼片的黏著。
4. 牙植體支台齒的永久性黏著。

禁忌症

1. 蓋髓術。
2. 如已知患者對丙烯酸甲酯單體、丙烯酸甲酯聚合體、丙酮或乙醇類成分過敏時，應避免使用本產品。

儲存方式

G-CEM LinkForce Cement 應存放於冰箱(2-8°C/ 35.6-46.4°F)。
G-Premio BOND DCA、G-CEM Try-In Paste 建議室溫存放(4-25°C / 39.2-77.0°F)。

色樣

Translucent(乾淨透明)、A2 (A2 半透明)、Opaque(一般遮色)、Bleach(漂白遮色)。

注意事項

1. 應隨時戴上個人防護措施如手套、面罩與眼罩。
2. 如有誤觸口腔黏膜或皮膚，請即用沾有酒精的海綿或棉花清除後，用水沖洗。可使用橡皮障與/或椰油將處置部位與皮膚或口內組織隔離。
3. 如誤觸眼睛，請用大量清水沖洗後就醫。
4. 丁香酚會抑制本產品的固化或連結效果，應避免一起使用；與過氧化氫物質(H₂O₂)合併使用也會阻礙本產品的固化或連結效果。
5. 光聚合過程應戴上護光罩以保護眼睛。
6. 如有濺到桌面或地板，請即用乾布清除。
7. 避免吸入或吸收產品成分。
8. 依據相關法規處置廢棄物。
9. 極罕見情況可能造成刺激反應。有此類反應即停止使用本產品並送醫處理。原廠使用說明內的產品依據 GHS 可能歸類為有危害性，請隨時上網取得最新的安全性資料 (<http://www.gceurope.com>)或向當地經銷商索取。

型號與規格

#	型號	規格
套組		
1	009540	G-CEM LinkForce System Kit: - G-CEM LinkForce 8.7g(5mL) A2*1, TR*1 - G-CEM Try-In Paste 1.5g(1.2mL) A2*1, TR*1 - G-Premio BOND (5mL)*1 - G-Premio BOND DCA (3mL)*1 - G-Multi PRIMER (5mL)*1 - GC Etchant 4.8g(3.6mL)*1 - GC Automix Tip Regular*30 - GC Automix Tip for endo(with oral tip)*5 - Dispensing tip needle type*25 - Disposable dispensing dish*20 - Disposable applicator II*50 - Light protective cap*2

2	009542	G-CEM LinkForce Starter Kit A2: - G-CEM LinkForce 8.7g(5mL) A2*1 - G-Premio BOND (5mL)*1 - G-Multi PRIMER (5mL)*1 - GC Automix Tip Regular*20 - Disposable dispensing dish*20 - Disposable applicator II*50
3	009543	G-CEM LinkForce Starter Kit TR: - G-CEM LinkForce 8.7g(5mL) TR*1 - G-Premio BOND (5mL)*1 - G-Multi PRIMER (5mL)*1 - GC Automix Tip Regular*20 - Disposable dispensing dish*20 - Disposable applicator II*50
補充包		
4	009544	G-CEM LinkForce Cement Refill A2: - G-CEM LinkForce 8.7g(5mL) A2*1 - GC Automix Tip Regular*20
5	009545	G-CEM LinkForce Cement Refill TR: - G-CEM LinkForce 8.7g(5mL) TR*1 - GC Automix Tip Regular*20
6	009546	G-CEM LinkForce Cement Refill Opaque: - G-CEM LinkForce 8.7g(5mL) Opaque*1 - GC Automix Tip Regular*20
7	009547	G-CEM LinkForce Cement Refill Bleach: - G-CEM LinkForce 8.7g(5mL) Bleach*1 - GC Automix Tip Regular*20
8	012803	G-CEM Try-In Paste A2: - G-CEM Try-In Paste 1.5g(1.2mL) A2*1 - Dispensing tip needle type*3 - Light protective cap*1
9	012804	G-CEM Try-In Paste Translucent: - G-CEM Try-In Paste 1.5g(1.2mL) TR*1 - Dispensing tip needle type*3 - Light protective cap*1
10	012805	G-CEM Try-In Paste Opaque: - G-CEM Try-In Paste 1.5g(1.2mL) Opaque *1 - Dispensing tip needle type*3 - Light protective cap*1
11	012806	G-CEM Try-In Paste Bleach: - G-CEM Try-In Paste 1.5g(1.2mL) Bleach *1 - Dispensing tip needle type*3 - Light protective cap*1
12	009552	G-Premio BOND DCA 3mL refill
13	009553	G-Multi PRIMER 5mL

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation
 地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan
 藥商名稱：台灣而至股份有限公司
 藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載
 (市售品需刊載實際地址)