

“而至”富士改良強化式二代黏合劑
“GC” FujiCEM 2

衛部醫器輸字第 025504 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

本產品限由牙醫使用於建議之產品用途

型號：

004599 GC FujiCEM 2 Refill(Automix compatible)

004600 GC FujiCEM 2 Automix

004647 FujiCEM 2 Dispenser

產品用途

1. 金屬基座的嵌體、覆體牙冠及牙橋之黏著。
2. 樹脂類嵌體、覆體牙冠及牙橋之黏著。
3. 全陶瓷嵌體之黏著。
4. 高強度(氧化鋁基底)之全陶瓷牙冠及牙橋之黏著。
5. 金屬、陶瓷與纖維柱釘之黏著。

禁忌症

1. 覆髓。
2. 罕見情況下會有患者對本產品產生過敏反應。遇此情況時請即停止使用本產品並就醫。


組件表 (Fig. 1)

A. 膏劑筒裝

1. 筒蓋 2. 內部活塞 3. 針筒嘴

B. GC FujiCEM 攪拌嘴

9. 釋放鍵 10. 固定夾 11. 導引針

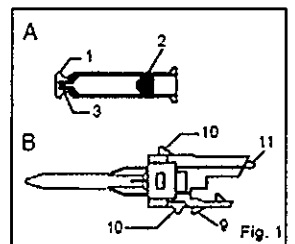

使用方法說明

雙膏劑的比率 (g/g)	2.0 / 1.0
攪拌時間 (sec.)	10''-15''
操作時間 (分、秒)(溫度 23°C) (從攪拌開始計算)	2'15''
操作最終完成時間(分、秒) (修復體定位後)	4'30''

膏劑擠壓器的清洗/滅菌

請依據相關使用說明執行膏劑擠壓器的清洗與滅菌程序。

色樣

淺黃色

儲存方式

在室溫下儲存，應避免受熱，潮濕與直接日照，儲存溫度(4-25°C) (39.2~77.0°F)。

長時間不用時，須放置於冰箱儲存。

(架儲期:製造日期後推兩年)

包裝

1. GC FujiCEM 2 Automix：膏劑筒裝(13.3g / 7.2mL)2筒，攪拌嘴44支
2. GC FujiCEM 2 Refill：膏劑筒裝(13.3g / 7.2mL)2筒，22號攪拌墊
3. 膏劑擠壓器1支

注意事項

1. 如有誤觸到口腔組織或是皮膚時，請立即用海綿或是棉花沾酒精清除後，用水沖洗。為避免誤觸，可用橡皮障或是棉條將操作區與皮膚或是口腔組織隔離。
2. 如有誤觸眼睛時，請用水沖洗後立即就醫。
3. 極少數情況下金屬(如本產品內的鍍鎳鋁材)，會導致過敏反應。發生此現象時，請立即停用本產品並就醫。
4. 膏劑擠壓器須存放於遠離化學物質(如含有鹵素成分的碘酊劑)，否則可能會退色
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER含有2%氯化鐵，故不建議與含有腎上腺素的產品使用，否則會污染口腔組織。
6. 本產品不得與含有丁香油的材料合併使用，因為丁香油會影響本產品的定型或是黏著特性。
7. 本產品不適用於填充或是牙冠心的堆疊。

製造廠名稱：GC Corporation, Fuji Oyama Factory

製造廠地址：584-1 Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun, Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：臺北市松山區民生東路三段156號14樓