

“而至”富士玻璃離子體黏著劑 “GC” Fuji Radiopaque Glass Ionomer Luting Cement

衛署醫器輸字第 012644 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用。

僅限牙科專業醫事人員使用於建議用途。

適應症

GC Fuji™ I

- 黏著金屬基底的內嵌體、冠蓋體、牙冠、牙橋以及冠心根柱。
- 黏著高強度(氧化鋁基底)的全陶瓷牙冠以及牙橋。

GC Fuji PLUS™

- 黏著金屬基底的內嵌體、冠蓋體、牙冠、牙橋以及牙釘。
- 黏著樹脂的內嵌體、冠蓋體、牙冠、牙橋以及牙釘。
- 黏著所有類型的陶瓷內嵌體
- 黏著高強度(氧化鋁基底)的全陶瓷牙冠以及牙橋。
- 黏著金屬、陶瓷及纖維冠心根柱

色樣

GC Fuji™ I:

-淺黃色

GC Fuji PLUS™:

-黃色

使用方式

GC Fuji™ I

粉/液 比例 (g/g)	1.8/1.0*
混和時間 (min., sec.)	20"
工作時間 (23°C/73°F) (min., sec.)	2'00"
淨固化時間(37°C/99°F) (min., sec.)	2'30"
總完成時間 (37°C/99°F, after seating the restoration) (min., sec.)	4'30"

*標準粉/液比例為 1.8g/1.0g (1 大匙配上 2 滴液體，或 1 小匙配上 1 滴液體)

GC Fuji PLUS™

粉/液 比例 (g/g)	2.0/1.0
混和時間 (min., sec.)	20"
工作時間 (23°C/73°F) (min., sec.)	2'30"
固化時間(37°C/99°F) (min., sec.)	4'30"

禁忌症

- 直接覆髓。
- 已知對玻璃離子體黏著劑、甲基丙烯酸甲酯單體或聚合物過敏患者應避免使用本產品。

警告

- 如接觸口腔組織或皮膚，立即使用沾有酒精的海綿或棉布拭去。用水沖洗。可使用橡皮障和/或可脂隔離操作區與皮膚或口腔組織。
- 如碰觸到眼睛，立即用水清洗並就醫。
- 請勿將本產品與其他玻璃離子體黏著劑混合使用。
- 本產品不適合用於填充或牙冠堆築。
- 在極少數情況下，某些人可能會對本產品過敏。如遇此狀

況，請立即停止使用並諮詢醫生。

6. 應配戴個人防護設備(PPE)，如手套、口罩和防護鏡。

7. GC Fuji PLUS-GC Fuji PLUS CONDITIONER 含有 2%氯化鐵(Ferric Chloride)。因此本產品不建議與腎上腺素並用以免造成口腔組織染色。

8. GC Fuji PLUS-請勿將 GC Fuji PLUS 與含有丁香酚的材料一起使用，以免造成無法適當固化或黏著。

清潔與消毒:

復次使用調配系統-為避免病患間交互感染，此裝置需進行中度消毒。

使用後請立即檢查裝置與標籤是否損壞。

如有損壞，請立即丟棄。

請勿浸泡。

請徹底清潔裝置，防止乾燥以及汙染物堆積。

根據國家指南，以核准的預防感染產品進行中度消毒。

儲存

為取得最佳效能，建議存放在 4-25 °C (39-77 °F)。

避免潮濕及受陽光直射。

型號及規格

#	型號	規格
1	003202	Fuji I 1-1P -35g Powder -25g (20ml) liquid -Double-ended powder scoop -Mixing pads (No. 20)
2	003135	Fuji Plus 1-1P Yellow -15g Powder -8g (7ml) liquid -GC Fuji PLUS CONDITIONER 7g (6.5ml) -Double-ended powder scoop -Plastic spatula -Mixing pads (No. 23)
3	003137	Fuji Plus Powder 15g Yellow -Double-ended powder scoop
4	003140	Fuji Plus Liquid 8g (7ml)

製造業者名稱：GC Corporation Fuji Oyama Factory

製造業者地址：584-1, Nakahinata, Oyama-cho, Sunto-gun, Shizuoka-Ken, 410-1307, Japan

醫療器材商名稱：台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址：(備註：本項不核定於標籤、說明書或包裝，市售品請逕依所轄衛生局最新核定之內容刊載醫療器材商地址)