

"而至" 優尼特拉普自凝壓克力樹脂
"GC" UNIFAST Lab Self-Curing Acrylic Resin

衛部醫器輸字第 038645 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

適應症

1. 製作臨時嵌體、牙冠和牙橋。
2. 假牙修復。

禁忌症

已知對甲基丙烯酸酯單體或甲基丙烯酸酯聚合物過敏的患者避免使用本產品。

使用說明

	Type-B	Type-F
建議用法	加壓法、筆塗法	加壓法、矽膠芯混合法
標準粉液比例 (可調範圍)	2 g 粉末對 1 mL 液體 (2 g 對 1 mL – 1.5 g 對 1 mL)	2 g 粉末對 1 mL 液體 (2 g 對 1 mL – 1.8 g 對 1 mL)
固化時間 (23°C / 73°F) (使用加壓法時)	約 5 分鐘	約 7 分 35 秒

注意：

1. 在患者口內進行暫時性黏著前，可將假牙浸泡在水中至少 10 分鐘，以減少殘留的單體量。
2. 細小或薄弱的混合材料可能無法適當固化，在口內放置/暫時性黏著前，請確保混合材料完全固化。
3. 請勿使用本產品修復假牙基底材料，或重新襯底由聚碳酸酯、聚矽或聚醚矽樹脂製成的暫時性牙冠。

色調

Type-B：A2、A3

Type-F：A2、A3

儲存

為達到最佳效能，建議儲存在陰涼處 (4-25°C / 39-77°F)。

警告

1. 液體易燃。避免接觸點火源。請勿在火源或高溫附近存放或使用。
2. 避免粉末、液體或混合物直接接觸皮膚。如有接觸，請用沾有酒精的棉球或海綿擦拭，並用水沖洗。
3. 避免粉末、液體或混合物直接接觸眼睛。如有接觸，請立即用水沖洗並就醫。
4. 請依各類型粉末/液體比例的可調範圍內使用本產品。
5. 讀取液體量器刻度時，請保持視線與液面平行，並讀取液面最低點。
6. 液體具揮發性。請在通風良好的區域使用。若混合材料在固化前放入患者口內，請建議患者用鼻子呼吸。

7. **Type-F** 不應使用筆塗法。由於聚合不足，固化後的表面和邊緣可能會變白。
8. 液體不應長時間留在橡膠杯中，因為這會改變操作特性。
9. 液體可能會隨時間變黃，但這不會影響其功能。
10. 請勿將橡膠杯中剩餘的粉末或液體倒回瓶中。
11. 若使用預製臨時牙冠作為橋體製作臨時牙橋，在置入患者口中前，請先將牙橋浸泡在 **50°C / 122°F** 的水中 5 分鐘，或在室溫下靜置 30 分鐘後，以確保完全硬化。
12. 請勿將本產品與 **UNIFAST Trad**、**UNIFAST III** 或任何其他壓克力樹脂產品混合使用。
13. 請勿使用曾使用於與其他壓克力樹脂的刷子或橡膠杯，因為這可能會延遲或抑制固化。
14. 在修整和拋光固化材料時，請佩戴防塵口罩。
15. 應始終配戴個人防護裝備(PPE)，例如手套、口罩和安全眼鏡。
16. 在極少數情況下，本產品可能會導致某些人過敏。如果出現任何此類反應，請停止使用並諮詢醫生。

型號及規格

型號	規格
10041833	UNIFAST Lab Liquid 100g(104mL)
10041835	UNIFAST Lab Type-B Powder 100g A2
10041836	UNIFAST Lab Type-B Powder 100g A3
10041843	UNIFAST Lab Type-F Powder 100g A2
10041844	UNIFAST Lab Type-F Powder 100g A3

製造業者名稱：(O) GC Dental Products Corporation

(P) GC Dental Products Corporation Kachigawa Plant

製造業者地址：(O) 2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

(P) 1-3-3 Kachigawa-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0945, Japan

醫療器材商名稱：台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址：(備註：本項不核定於標籤、說明書或包裝，市售品請逕依所轄衛生局最新核定之內容刊載醫療器材商地址)